

Enzymatischer Reiniger für die
Aufbereitung medizinischen Produkten.

Beschreibung

Puradet Ecozyme, ein kostengünstiger enzymatischer Reiniger für die Aufbereitung von chirurgischen und dentalen Instrumenten, Endoskopen und anderen medizinischen Utensilien. Puradet Ecozyme enthält keine gefährlichen Stoffe und reinigt Proteine und organische Verschmutzungen von allen Oberflächen.

Puradet Ecozyme ist als Medizinprodukt der Klasse 1 klassifiziert.

Eigenschaften

- Biologischer Reiniger für die Entfernung von Proteinen und anderen organischen Stoffen
- Eine Mischung aus Tensiden und Enzymen
- Chlorfrei
- Aldehyde frei
- Geruchlos
- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Nicht fixierend
- Nicht korrosiv, keine Beschädigung von empfindlichen Beschichtungen
- Kosteneffizient

Anwendung

Puradet Ecozyme ist ein kraftvoller Reiniger für die Entfernung von organischen Rückständen und wird in Krankenhäuser, Gesundheitszentren, Zahnärzten und Labors verwendet.

Verträglichkeit

Puradet Ecozyme ist mit allen bekannten Materialien wie Plastik, Gummi und anderen in der Medizin verwendeten Materialien kompatibel. Bei Ungewissheit den Hersteller kontaktieren.

Sicherheitshinweise

Puradet Ecozyme ist nicht brennbar, 100% biologisch abbaubar und ist verdünnt als nicht reizend klassifiziert.

Puradet Ecozyme ist nur für die maschinelle Reinigung gedacht. Das Konzentrat ist als reizend für Haut und Augen klassifiziert. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Weitere Informationen entnehmen sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Typische Eigenschaften

Erscheinung:	klare Flüssigkeit
Geruch:	geruchlos
pH-Wert:	8.5-9.0 (1% Lösung)
Dichte g/cm ³ bei 20°C:	1.09
Löslichkeit in Wasser:	komplett mischbar
Flammpunkt:	nicht brennbar

Haltbarkeit

2 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde, Lagertemperature zwischen 5°C-25°C, vor direktem Sonnenlicht schützen.

Gebrauchsanleitung

Puradet Ecozyme wird als Konzentrat geliefert und eine Verdünnung ist vor Gebrauch notwendig. Temperaturen über 35°C verhindern Schaumbildung.

Maschinelle Reinigung

Schritt	Wasser	Zeit	Temperatur	Produkt	Dosierung
Vorwaschen	Kaltwasser	3 Min			
Waschen	Heisswasser	10 Min	55°C	Puradet Ecozyme	7ml/L oder 0.7%
Spülen I	Heisswasser	1 Min.			
Spülen II	VE-Wasser	1 Min.			
Thermodesinfektion	VE-Wasser	3 Min.	93°C	Puradet Drybooster	1 ml/L oder 0.1%
Trocknen					

Puradet Ecozyme ist kein Desinfektionsmittel!

Zusätzliche Informationen

Enzyme verlieren die Wirkung bei Anwendungstemperaturen über 60°C.

Dosierung über 35°C verhindert eine Schaumbildung.

Entsorgung

Kleine Mengen können mit reichlich Wasser weggespült oder mit flüssigkeitsbindendem Material aufgenommen und mit klinischem Abfall entsorgen werden.

Nach entsprechenden OECD-Kriterien vollständig biologisch abbaubar.